

## ЯК ПРАВИЛЬНО ВИМІРЯТИ РІВЕНЬ ЦУКРУ В КРОВІ ГЛЮКОМЕТРОМ GLUCOMAXX®?




Перед тим як провести тест, ретельно вимийте та висушіть руки. Витягніть тест-смужку і щільно закрийте флакон.




Вставте тест-смужку в гніздо глюкометра контактною стороною. Глюкометр увімкнеться автоматично, і з'являться символи смужки та краплі крові.



Виберіть відповідний режим вимірювання, натиснувши головну кнопку. На дисплеї відобразиться AC (тест перед прийманням їжі), PC (тест після приймання їжі), QC (вимірювання за допомогою контрольної рідини) або GEN (вимірювання в будь-який час доби, незалежно від часу з моменту останнього приймання їжі).

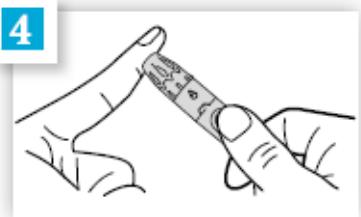

Правильно зробіть прокол (відповідно до інструкцій на попередній сторінці).

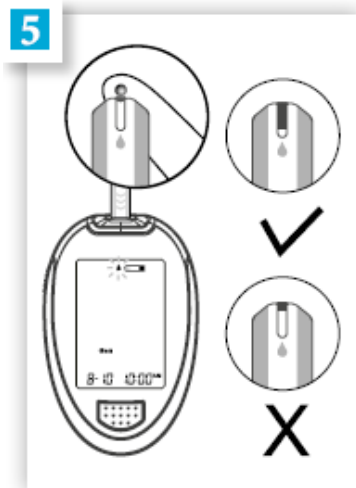

Обережно прикладіть абсорбуючий отвір у верхній частині тест-смужки до краплі крові. Вікно підтвердження має бути повністю заповнене. Кров автоматично втягнеться. Не відсувайте абсорбуючий отвір від кінчика пальця, доки не почуєте звуковий сигнал.



Результат рівня цукру в крові з'явиться після того, як глюкометр почне зворотний відлік до 0. Цей результат визначення рівня цукру в крові буде автоматично збережено в пам'яті пристрою разом з датою та часом.



Використовуючи тест-смужку автоматичного видалення, витягніть використану тест-смужку. Глюкометр вимикається автоматично. Утилізуйте використаний ланцет.