



## JAK PRAWIDŁOWO WYKONAĆ POMIAR STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI GLUKOMETREM GLUCOMAXX®?

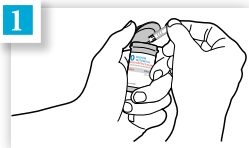


**1** Umyj i osusz ręce przed rozpoczęciem badania. Wymij pasek testowy i szczelnie zamknij folię.




**2** Włóż pasek testowy do szczeliny glukometru stroną ze stykami. Glukometr włączy się automatycznie i pojawi się symbol paska oraz kropli krwi.

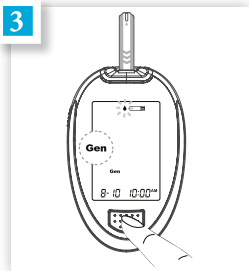


**3** Wybierz odpowiedni tryb pomiaru poprzez naciśnięcie przycisku głównego. Na ekranie pojawi się symbol AC (badanie przed posiłkiem), PC (badanie po posiłku), QC (pomiar kontrolny-na płynie kontrolnym) lub GEN (pomiar o każdej porze dnia bez względu na czas od ostatniego posiłku).

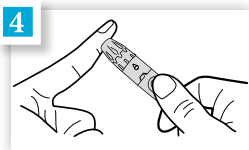


**4** Wykonaj prawidłowo nakłucie (zgodnie z instrukcją na poprzedniej stronie).

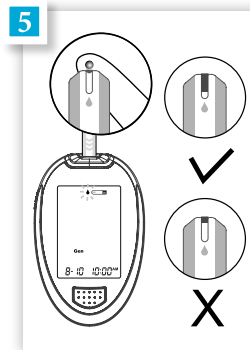

**5** Ostrożnie przyłóż otwór chłonny na szczycie paska testowego do kropli krwi. Okienko potwierdzenia powinno być całkowicie wypełnione. Krew zostanie samoczynnie zassana. Nie odsuwaj otworu chłonnego od opuszki palca do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego.

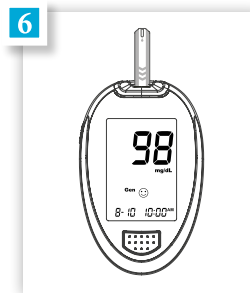

**6** Wynik badania stężenia glukozy we krwi pojawi się po odliczeniu przez glukometr do 0. Ten wynik stężenia glukozy we krwi zostanie automatycznie zapisany w pamięci urządzenia wraz datą i godziną.

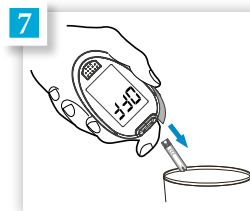

**7** Korzystając z automatycznego wyrzutu paska, usuń zużyty pasek testowy. Glukometr wyłączy się automatycznie. Wyrzuć zużyty lancet.