

JAK PRAWIDŁOWO WYKONAĆ POMIAR STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI GLUKOMETREM IXELL® PRO?




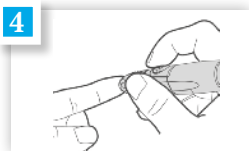
1 Zdejmij folię ochronną zabezpieczającą wieczko fiolki pasków testowych. Otwierając fiolkę po raz pierwszy, zapisz datę na etykiecie.




2 Dokładnie umyj i wysusz ręce. Wyjmij pasek testowy, a następnie dokładnie zamknij fiolkę.




3 Wsuń pasek testowy, aby włączyć glukometr. Kolejność pojawiania się symboli na wyświetlaczu jest następująca: „CHK” i migający symbol „”.



4 Wykonaj prawidłowo nakłucie (zgodnie z instrukcją na poprzedniej stronie).

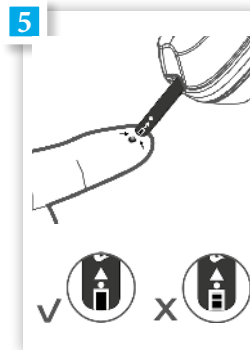

5 Gdy na wyświetlaczu miga symbol „”, przytrzymaj i przyłóż otwór chłonny paska testowego do kropli krwi, aż do całkowitego wypełnienia okienka potwierdzenia.



6 Po odliczeniu przez glukometr do 0, wynik Twojego badania pojawi się wraz z datą i godziną wykonania pomiaru i zostanie automatycznie zapisany w pamięci.



7 Usuń ręcznie pasek testowy ze szczeliny glukometru i wyrzuć go. Glukometr wyłączy się automatycznie po wyjęciu paska testowego.