


JAK PRAWIDŁOWO WYKONAĆ POMIAR STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI GLUKOMETREM IXELL®?





1 Otwierając fiolkę po raz pierwszy, zapisz datę na etykietce.

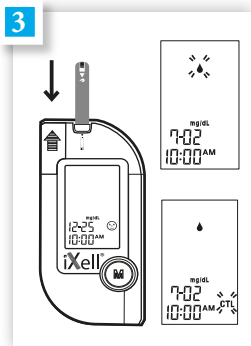


2 Dokładnie umyj i wysusz ręce. Wyjmij pasek testowy, a następnie dokładnie zamknij fiolkę.




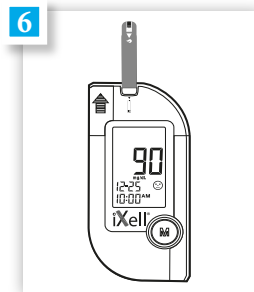
3 Wsuń pasek testowy do szczeliny pomiarowej. Glukometr włączy się automatycznie, wyświetlając kolejno symbole: „CH”, „”, wysokość temperatury otoczenia, godzinę, datę i migający symbol „”. Naciśnij przycisk M, pojawi się wówczas symbol „CTL”, co oznacza, że urządzenie znajduje się w trybie badania kontrolnego. W tym trybie wynik badania nie zostanie wprowadzony do pamięci. Jeśli chcesz zrezygnować z przeprowadzenia badania kontrolnego przy pomocy płynu do badań kontrolnych, należy ponownie nacisnąć przycisk M, dzięki czemu symbol „CTL” zniknie.




4 Wykonaj prawidłowo nakłucie.

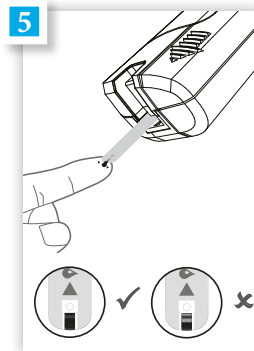

5 Podczas gdy na wyświetlaczu miga symbol „”, przyłożyć szczyt paska testowego do nierozmazanej kropli krwi do momentu, aż okienko potwierdzenia zostanie całkowicie napełnione krwią.



6 Dokładny wynik otrzymasz w 7 sekund. Po odliczeniu przez glukometr do 0, wynik Twojego badania pojawi się wraz z datą i godziną wykonania pomiaru i zostanie automatycznie zapisany w pamięci.

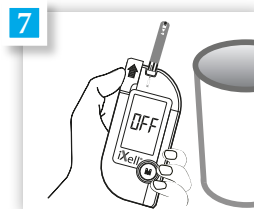

7 Usuń zużyty pasek testowy, naciskając przycisk wysuwania paska, lub wyciągnij go ręcznie. Po wysunięciu zużytego paska testowego na wyświetlaczu ukazuje się symbol „OFF”, a urządzenie wyłączy się automatycznie.