


JAK PRAWIDŁOWO WYKONAĆ POMIAR STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI GLUKOMETREM IXELL® AUDIO?



1 Otwierając fiolkę po raz pierwszy, zapisz datę na etykiecie.



2 Dokładnie umyj i wysusz ręce. Wyjmij pasek testowy, a następnie dokładnie zamknij fiolkę.

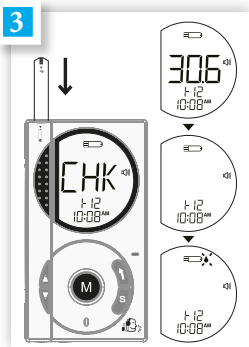

Wsuń pasek testowy do szczeliny pomiarowej. Glukometr włączy się automatycznie, wyświetlając kolejno symbole:

- „CHK” i
- i wysokość temperatury otoczenia
- i migający symbol kropli krwi „”




Komunikat głosowy

Jesteś w trybie badania glukozy.



4 Wykonaj prawidłowo nakłucie.

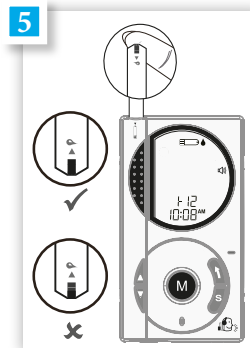

5 Podczas gdy na wyświetlaczu miga symbol „”, przyłóż próbkę krwi do otworu chłonnego na pasku testowym do momentu, aż okienko potwierdzenia zostanie całkowicie wypełnione krwią. Glukometr automatycznie rozpoczyna odliczanie.



Komunikat głosowy

Wykonuj badanie.




6 Dokładny wynik otrzymasz w 7 sekund. Po odliczeniu przez glukometr do 0 na wyświetlaczu glukometru podany zostanie wynik Twojego badania krwi. Odczyt jest automatycznie zapisywany w pamięci urządzenia.



Przykładowy komunikat głosowy

Stężenie glukozy wynosi 92 miligram na decylitr.

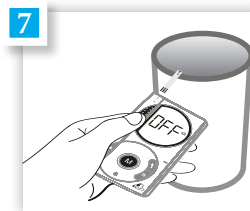

7 Po zakończeniu badania usuń zużyty pasek testowy, naciskając przycisk wysuwania paska lub wyciągnij go ręcznie. Po wysunięciu zużytego paska testowego na wyświetlaczu ukazuje się symbol „OFF”, a urządzenie wyłączy się automatycznie.