


Pojemnik na lek z siateczką (1 sztuka)

Wyrób medyczny.

Pojemnik kompatybilny wyłącznie z nebulizatorem iXellence[®] NEB Mesh. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi nebulizatora iXellence[®] NEB Mesh, aby uzyskać więcej informacji.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

1. Odłączyć ustnik/maskę od pojemnika na lek.
2. Pojemnik na lek wypełnić destylowaną lub przegotowaną (zimną) wodą. Nie przekraczać znaku "MAX". Zakręcić szczelnie pokrywę. Delikatnie przechylić do przodu i do tyłu. Odkręcić pokrywę, przechylić urządzenie na bok i usunąć płyn.
3. Następnie napełnić pojemnik do znaku "MAX" i włączyć urządzenie. Pozostawić inhalator w trybie pracy przez 1 do 2 minut.
4. Pozostałą wodę usunąć, a nadmiar płynu delikatnie strząsnąć. Pojemnik na lek odłączyć od jednostki głównej i odłożyć na suchy, czysty ręcznik papierowy.
5. Nie wolno pojemnika na lek zanurzać w wodzie. Elektrody na jednostce głównej i pojemniku na lek należy utrzymywać suche. Można przecierać je wacikiem nasączonym 75% alkoholem lub miękkim kawałkiem niestrzępiącego się materiału.

 **TaiDoc Technology Corporation**
B1-7F, No. 127, Wugong 2nd Rd.,
Wugu Dist., 24888 New Taipei City, Taiwan
www.taidoc.com

IMPORTER: Genexo Sp. z o. o.
ul. Gen. Zajączka 26
01-510 Warszawa, Polska
tel. (+48 22) 839 11 99
fax (+49 22) 839 23 12
www.genexo.pl

 **MedNet EC-REP GmbH**
Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany

Do użytku tylko przez jedną osobę.
Objaśnienie symboli znajduje się w instrukcji obsługi nebulizatora.

